



# 医療施設用

塩素・アルコール不使用

イギリスで研究開発された常識を覆す除菌・抗菌剤

# バイオトロール

## Antimicrobial Surface Sanitiser


バイオトロールとは革新的な衛生技術により生まれた製品です。  
生分解され環境に優しい次世代製品です。

- 特徴 **1** 優れた除菌力
- 特徴 **2** 乾いてからも除菌効果が 24 時間持続
- 特徴 **3** 基材を傷めません
- 特徴 **4** アルコール、塩素不使用で無臭



## 革新的な特許配合技術でバイオトロールは生まれました

バイオトロールは3つの除菌成分（※）を特許配合技術で掛け合わせるにより誕生しました。  
※塩化ベンザルコニウム、ジデシルジモニウムクロリド、ポリヘキサメチレンピグアニド

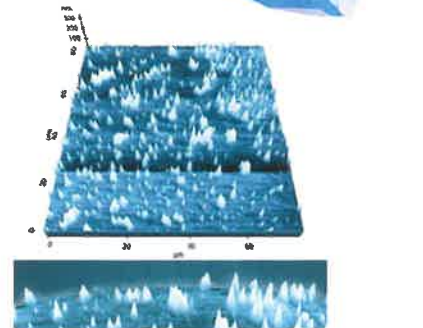

原子間力顕微鏡で見たバイオトロール表面には針山が確認できます。

## 低い基材損傷性

バイオトロールの特徴の1つに、基材への損傷性が極めて低い事があげられます。基材によって除菌剤を変える必要がないので、あらゆる環境の清拭をバイオトロール1本にまとめてしまう事が可能となります。

対象基材	バイオトロール			塩素系薬剤A			塩素系薬剤B		
	7日後	28日後	154日後	7日後	28日後	154日後	7日後	28日後	154日後
ステンレス	○	○	○	×	×	×	×	×	×
アルミニウム	○	○	○	△	△	△	×	×	×
マットレスカバー	○	○	○	×	×	×	×	×	×
ポリカーボネート板	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塩化ビニール	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※EN(欧州統一規格)による金属・非金属の腐食・劣化試験




# バイオトロール サニタイジングワイプ

医療施設  
環境清掃用

1ステップで洗浄、除菌、そして効果が24時間持続。

## マイクロファイバークロスの 力で汚れを強力除去！

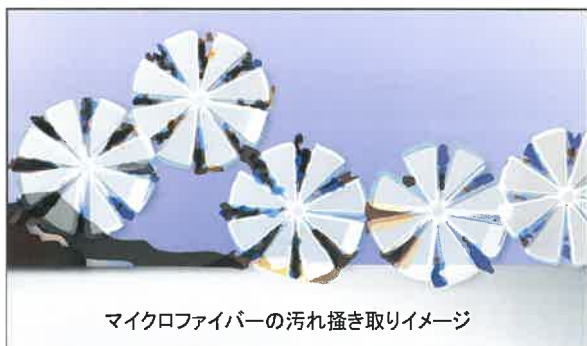


**特徴1** マイクロファイバー繊維が細かい汚れを掻き取ります

**特徴2** 汚れが再付着しません

品番	商品名	容量	ケース	JAN
GSB4M51	バイオトロール 濃縮タイプ 8倍希釈用	5L	2本	4562244181472
GSB4M52	バイオトロール 濃縮タイプ 8倍希釈用	500ml	14本	4562244181489
GSB4M03	バイオトロール 希釈済タイプ	5L	2本	4562244181243
GSB4M18	バイオトロール 希釈済 スプレータイプ	500ml	36本	4562244181533
GSB4M60	バイオトロール 希釈済 フォームタイプ	500ml	24本	4562244181687
GSB4M20	バイオトロール サニタイジングワイプ	120枚	12個	4562244181427


バイオトロールはラベルの色によってご使用方法が分かる様になっております。

取り扱い代理店

  
**医療施設用**  
**バイオトロール**

■青ラベル  
希釈済みです。  
そのままご使用可能です。

---

  
**1:7**  
**医療施設用**  
**バイオトロール**

■白ラベル  
水道水で8倍に希釈して  
ご使用ください。使用期限  
は希釈時から1ヶ月間です。

### 注意事項

- 目に入った場合は、水またはぬるま湯で十分にすすぐ。
- 容器は立てて直射日光を避け、子供の手が届かない場所に保管のこと。
- 魚の生息する池や水槽には使用しないでください。

### 販売元

ジーサイエンス株式会社  
〒607-8464 京都市山科区上花山久保町 62-1  
TEL.075-585-6830

<https://byotrol.jp/>

バイオトロール

検索

MADE IN UK